



Entlastung für Sie als Patient bei
der Kontrolle Ihres Diabetes



Diabetes-Management-Software für alle Diabetes-Typen

Unabhängig* und immer für Sie da: Als App-, PC-, Online-Version

*) Vitalparameter aus knapp 300 verschiedenen Geräten übernehmen. Aktuelle Übersicht auf sidiary.de

Vier wesentliche Vorteile für Sie als Patient

1

*Aktuelle Geräte-Übersicht auf www.sidiary.de

1 Vereinfachtes Handling Ihrer Vitalparameter


- Für alle Diabetestypen geeignet, d. h. Typ 1 & 2, Schwangere, blinde Menschen mit Diabetes, sowie alle Therapiearten, d. h. Basistherapie, CT, ICT, Pumpentherapie.
- Einfache Übernahme von Vitalparametern aus knapp 300 Geräten*.
- Direkter Datenimport aus den Geräten. Dadurch sind **weniger manuelle Eingaben** durch Sie als Anwender nötig, so dass fehlerhafte Eingaben deutlich seltener auftreten.
- Kompatibel** mit allen gängigen Tablets, PCs, Internet-Browsern sowie Mobiltelefonen und automatische Synchronisation für den Datenabgleich über den Knotenpunkt SiDiary-Online in der Cloud.
- Volltextsuche** für alle protokollierten Einträge.

Das Gesamtsystem SiDiary besteht aus diesen drei Komponenten ...

2

2 Bestmögliche Anpassung an Ihre persönlichen Anforderungen

- Sie als Anwender beantworten im **Profil-Assistent** einige Fragen zu Ihrem Diabetes. Mithilfe der Antworten wird die Software so konfiguriert, dass sie **bestmöglich Ihren persönlichen Anforderungen** entspricht.

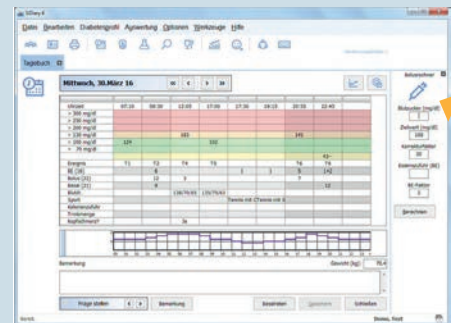

SiDiary PC-Version



SiDiary Online



SiDiary Mobile-Apps



Einfache Nutzung und Motivation ...


- Selbsterklärende Analysen, Trends und Grafiken sorgen für Entlastung bei der Entscheidung über die nächsten Behandlungsschritte.
- Direktes Feedback in Form von Smilies zu gemessenen Werten **verstärkt Ihre Motivation**.
- **Fotos Ihrer Mahlzeiten** in SiDiary hochladen und mit Ihren Diabetesberatern besprechen, ob Ihre Schätzung der Kohlenhydrate stimmt.
- **Hinzufügen persönlicher Aktivitäten** und dazugehöriger Daten durch Sie als Anwender. Selbst, wenn Sie in SiDiary Ihr Fitnessstraining oder täglich andere Parameter nachverfolgen möchten.

2

Schneller Überblick im Standard-AGP

- Farbiger Zeitstrahl für den **schnellen Überblick** und Möglichkeit, auffällige Tage direkt anzuschauen.
- **Darstellung umschaltbar** auf 5. bis 95. Perzentil (AGP, Version 4.0).
- **Auswertung** für Ereignisse mit niedriger/sehr niedriger Glukose (Anzahl + Zeitdauer).
- Sensorabdeckung und Time-in-Range.

Professionelle Reports mit übersichtlichen Vitalparametern

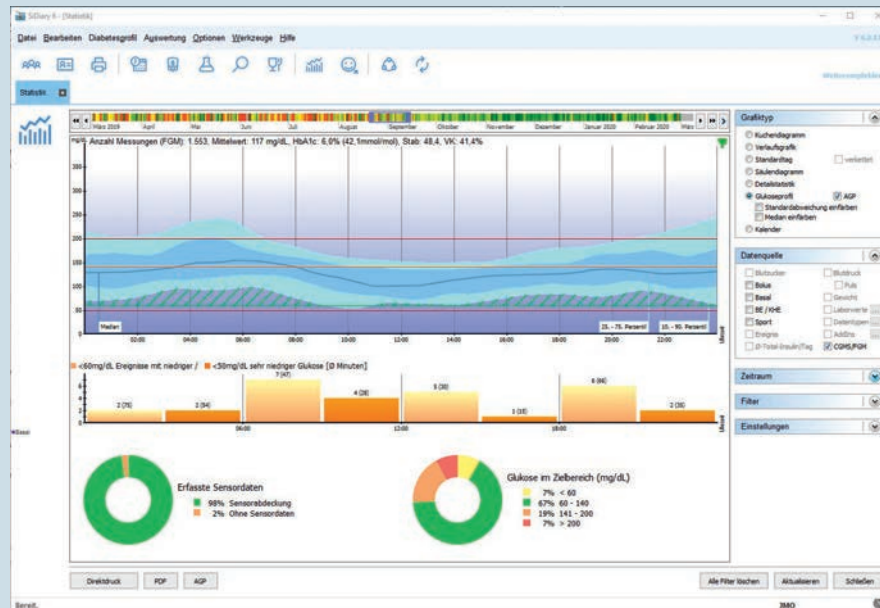


Verbesserungspotenziale auf einen Blick erkennen

Kalender mit Glukoseverlauf

- Anordnung nach Wochentagen erlaubt einfache Mustererkennung
- Tage sind anklickbar für Details im Tagebuch

Kalenderübersicht –
Alles auf einen Blick

Ausreißer schnell
erkennen – Rot für
Überzuckerung, gelb
für Unterzuckerung

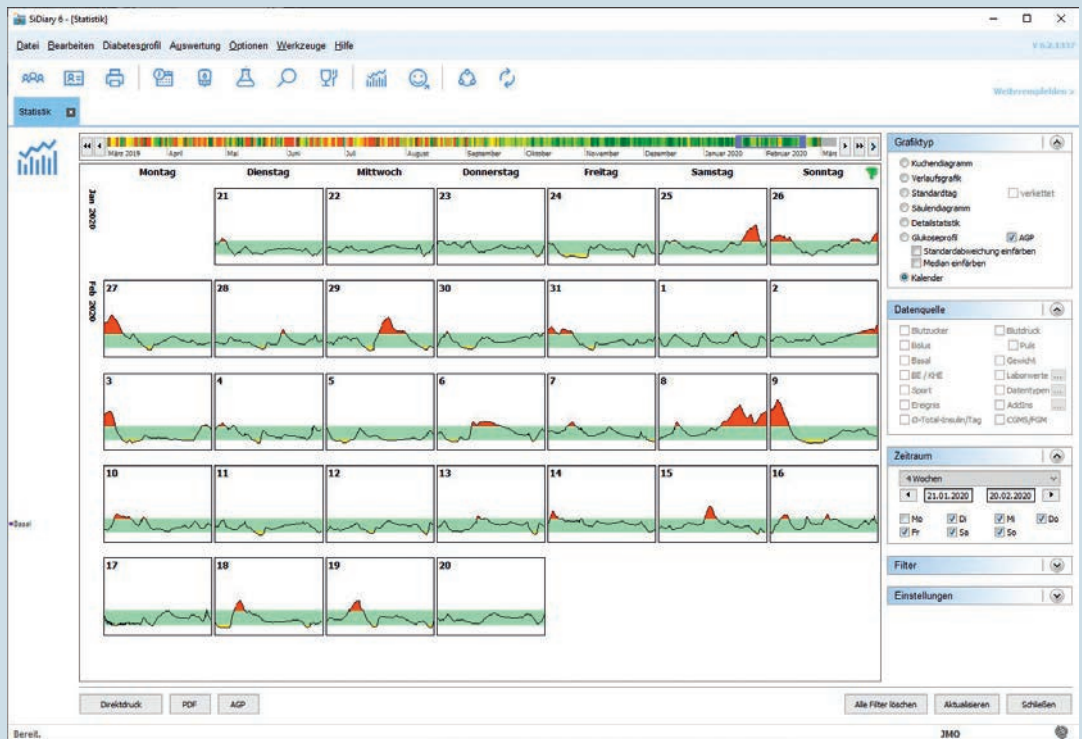



3

Sicherer Datenversand an Vertrauenspersonen oder Ihren Arzt

3 Gemeinsam mit Ihrem Arzt den Alltag mit Diabetes erleichtern

- **Datenversand** von Ihnen als Anwender an Ihren Arzt und/oder Ihre Vertrauenspersonen bei kritischen Blutzuckerwerten mit SiDiarys E-Mail-Assistent (komprimiert, verschlüsselt, kennwortgeschützt).
- Per **Datenfreigabe** durch Sie als Anwender bekommen Ihr Arzt und/oder Ihre Vertrauenspersonen automatisch eine Nachricht.
- Sie als Anwender können die Datenfreigabe jederzeit beenden oder ändern.
- Ihr Arzt erhält die **kompakte Quartalsdokumentation** in seinem Praxisverwaltungssystem und ist für Ihren nächsten Arzttermin gut informiert, um mit Ihnen für Sie bestmögliche Behandlungsschritte abzustimmen.

4

Vitalparameter einfach dokumentieren

4 Dokumentation mit einem Klick

- Import-, Export und Druckfunktionen zur **Archivierung Ihrer Vitalparameter** in Papierform oder als elektronisches Protokoll für Ihren behandelnden Arzt, Ihre Krankenkasse, die Rentenkasse oder das Versorgungsamt.
- **Datenbank** mit Ihrer kompletten Diabetesgeschichte.



Si | **Diary**

Ihr persönlicher
Assistent für
optimiertes
Selbstmanagement

Vertrauen durch Sicherheit und professionellen Supportservice!

Zertifizierungen

- SiDiary ist ein **Medizinprodukt** der Klasse 1 mit CE-Kennzeichen
- SiDiary wurde bereits 2017 mit dem **DiaDigital-Gütesiegel** ausgezeichnet (geprüfte Datensicherheit, Datenschutz, Blindentauglichkeit)
- **TÜV-zertifiziertes ISO 13485** Qualitätsmanagementsystem für Softwareentwicklung als Medizinprodukt



Zukunftssicher & DSGVO-konform

- Kontinuierliche **Einbindung weiterer Geräte** und Software-Schnittstellen
- **Updates inklusive** und zum Wunschtermin ausführbar
- Beliebig **erweiterbar** um individuell benötigte Vitalparameter
- **DSGVO-konform** durch sichere Datenverschlüsselung und verschlüsselte Datenübertragung
- Datenhaltung in **hochsicheren Datenzentren** der EU nach EU-Richtlinien.


Supportservice für Betreuung und Unterstützung – Wir sind für Sie da!


Egal ob es sich um technische Fragen, Störmeldungen, um Fragen zur Anwendung von SiDiary, zu Ihrem Abonnement oder um Anmerkungen handelt, unser Support steht Ihnen zur Verfügung. Antwort erfolgt spätestens am nächsten Arbeitstag per Rückruf oder E-Mail.

- Bürozeiten: Mo. – Fr., 10–18 Uhr
- Telefonisch: 06109 500 3909
- E-Mail: info@sinovo.de
- Fernwartung mit dem TeamViewer:
Ein entsprechendes Quick-Support-Modul ist in SiDiary enthalten

KONTAKT

 sidiary.de

 +49 6109 500 3909

 info@sinovo.de


The SINOVO logo, featuring the word 'SINOVO' in bold black letters with a green cross icon to the right, and 'health solutions' in smaller black letters below it.

SiDiary

ist eine Software der
SINOVO GmbH & Co. KG
Casimirstraße 2–4
60388 Frankfurt am Main

 **german
engineering**

Engagement in Verbänden

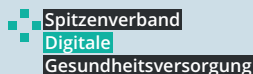The logo for the Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, featuring a green cross icon and the text 'Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung' in a stacked format.